

¡Estimado paciente!

Su médico le ha proporcionado un catéter vesical. Para facilitarle su uso, hemos desarrollado esta moderna válvula de catéter. Por favor, antes de usar la válvula, lea detenidamente las instrucciones de uso.

1. Apertura del dispositivo

Sostenga la lámina del empaque en ambas tiras y hale estas aparte. Tenga cuidado de que la válvula no caiga al suelo, para evitar que se ensucie. Cabe destacar que la válvula ya se encuentra esterilizada, por lo que no debe ser esterilizarla nuevamente, ya que esto podría afectar su funcionamiento.

2. Fijación al catéter

Sujete la válvula con el extremo superior o la parte antideslizante (3) hacia arriba, este debe quedar apuntando hacia usted. Presione de manera lineal el extremo superior en el conector del catéter (1). La válvula ha sido diseñada para quedar fija por sí sola al catéter, es decir que no debe presionar con fuerza ya que está diseñada para catéteres de distinto tamaño.

3. Vaciado de la vejiga urinaria


Para vaciar la vejiga sujete el extremo inferior (5) de la válvula sobre la taza del inodoro u otro recipiente, y deslice la lengüeta (4) hacia arriba. Tras vaciar la vejiga suelte la lengüeta deslizante (4), cerrando así la válvula automáticamente.

4. Uso nocturno

Durante la noche, inserte la sonda de la bolsa de orina (6) en el extremo inferior de la válvula (5). El material elástico especial garantiza la sujeción. En esta posición, la válvula está abierta, permitiendo el flujo de la orina. Controle que el tubo de evacuación (7) no esté doblado. Por la mañana, sujete firmemente la válvula por el extremo inferior (5) y realice la desconexión de la válvula (5) y de la bolsa urinaria (6). De esta forma, la válvula se cierra automáticamente. Ya puede retirar la bolsa de orina (8). Recuerde que mientras la bolsa de orina este conectada usted no debe accionar la lengüeta (4) ya que de ser así podría ocurrir una falla en la válvula.

5. Limpieza de la válvula

El MiroValve puede limpiarse con agua, o con un desinfectante clínico, únicamente debe limpiar el extremo inferior (azul) de la válvula (6), sin desconectar.

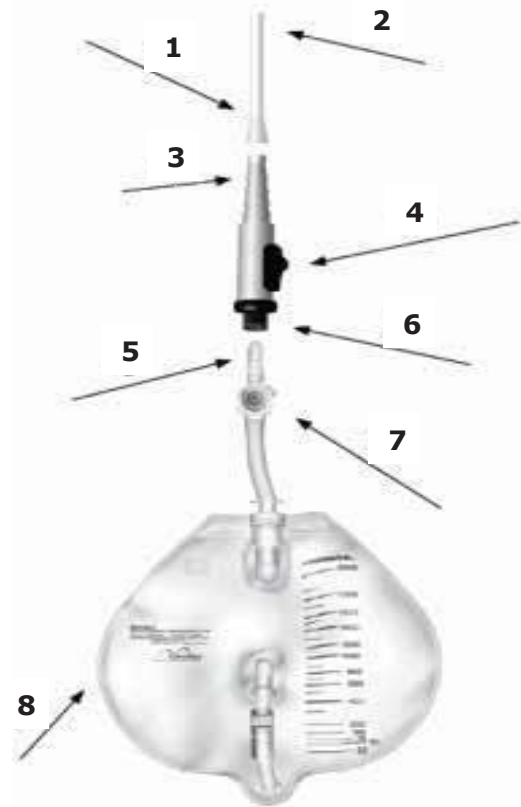

Importante:

En el caso de reutilización, las propiedades físicas, químicas y/o biológicas del producto pueden verse alteradas.

* Si tiene más preguntas, comuníquese con su médico tratante.